

DICOM(ダイコム)形式のファイル表示ソフトご紹介(MAC編)

CD やUSBメモリなどで他院から持ってきた検査画像データを簡単に表示できるビューワ(閲覧)ソフトをご紹介します。

◎ OsiriX(オザイリクス)

・ソフトウェアインストール方法


インターネットにて「<http://www.osirix-viewer.com/>」にアクセスします。



32bit 版のソフトウェアをクリックします。



ダウンロードページに切り替わります。

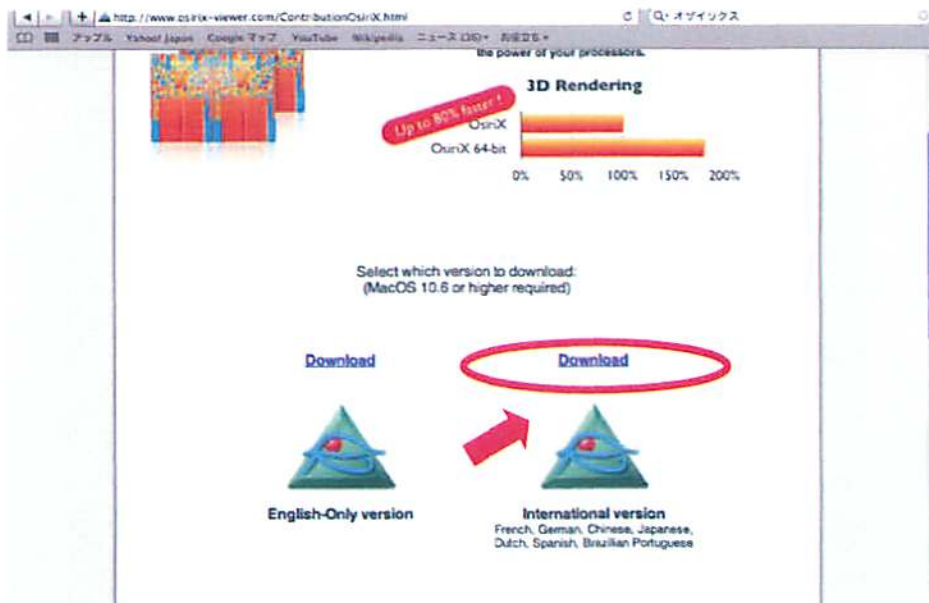


画面の下側にある「International Version」の Download をクリックします。



English-Only version

International version
French, German, Chinese, Japanese,
Dutch, Spanish, Brazilian Portuguese


ダウンロードが開始されます。

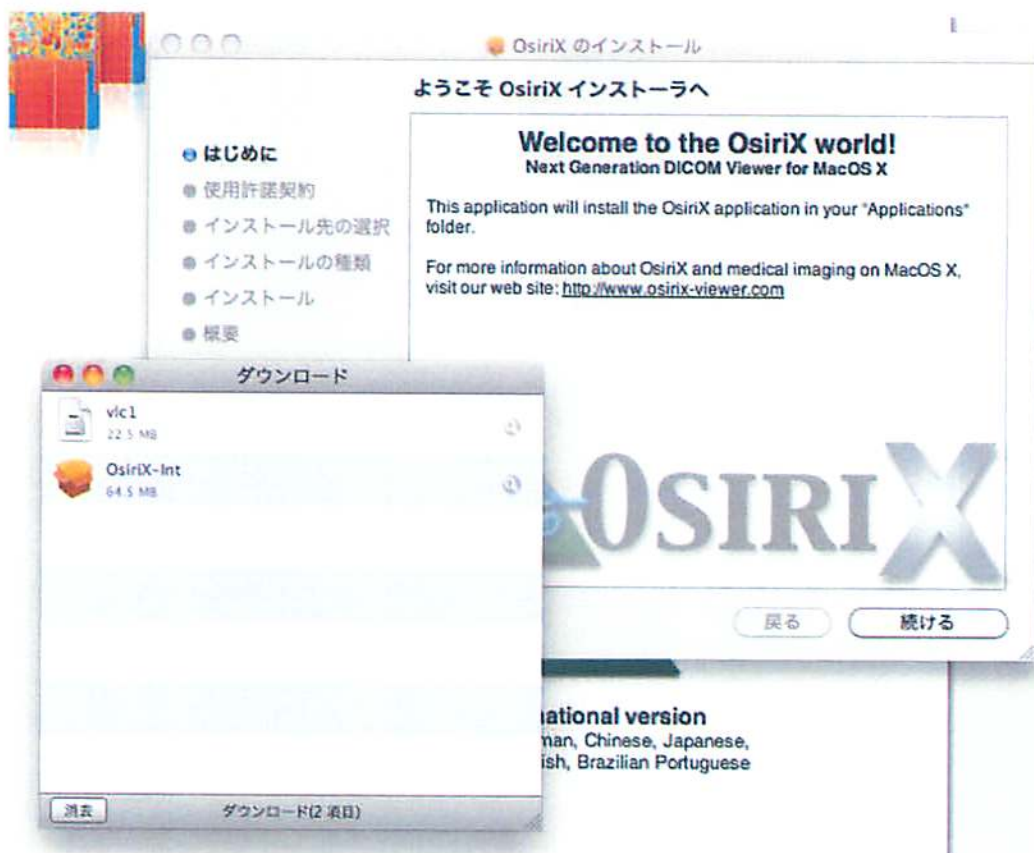

ダウンロードが終了すると、自動的にインストールが始まりますので、ダウンロードのウィンドウを閉じます。



「続ける」をクリックします。

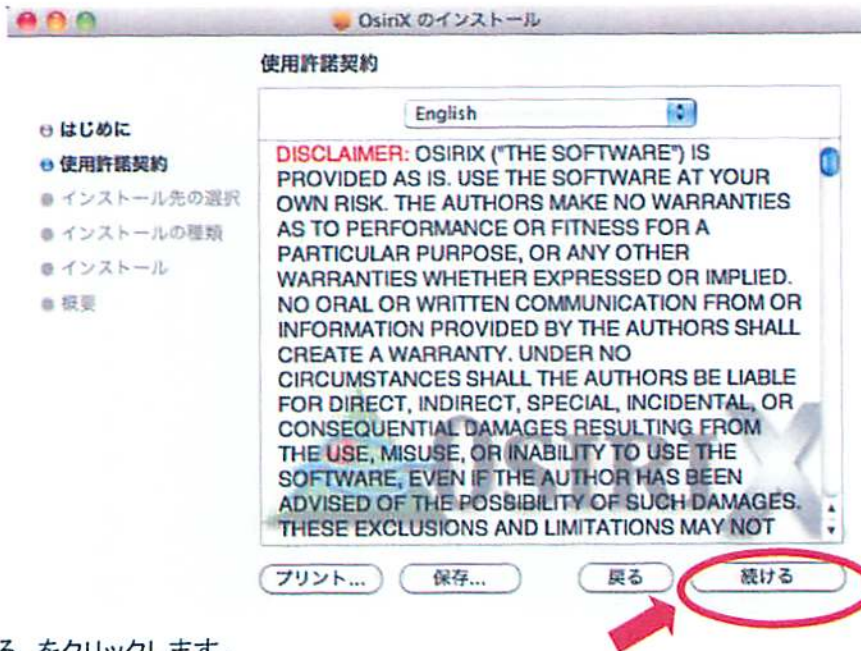

続ける をクリックします。

このソフトウェアのインストールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契約の条件に同意する必要があります。


インストールを続けるには、「同意する」をクリックしてください。インストールをキャンセルしてインストーラを終了する場合は、「同意しない」をクリックしてください。




同意する をクリックします。




続ける をクリックします。

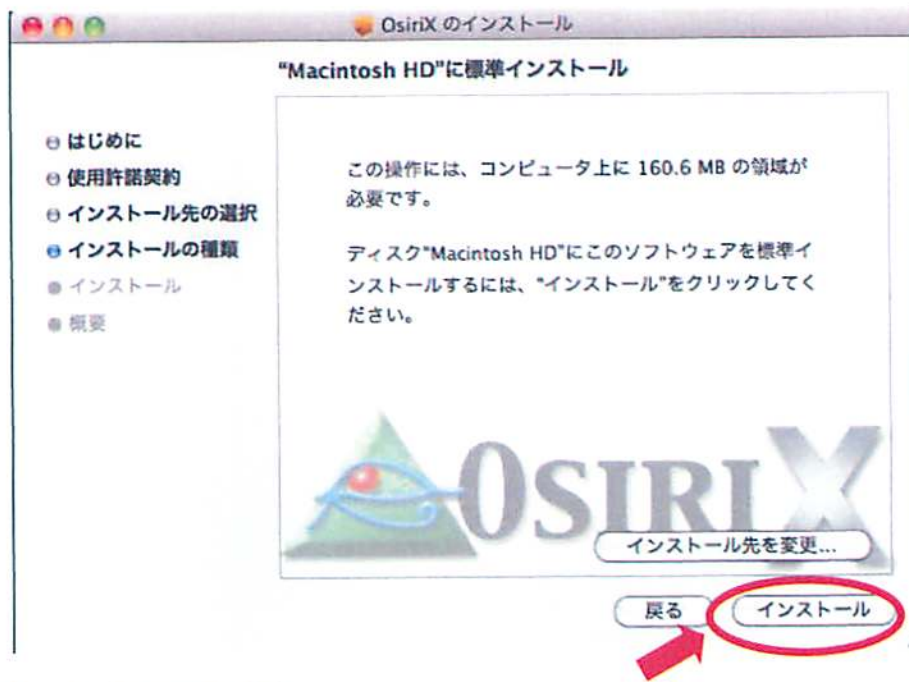

インストール をクリックします。

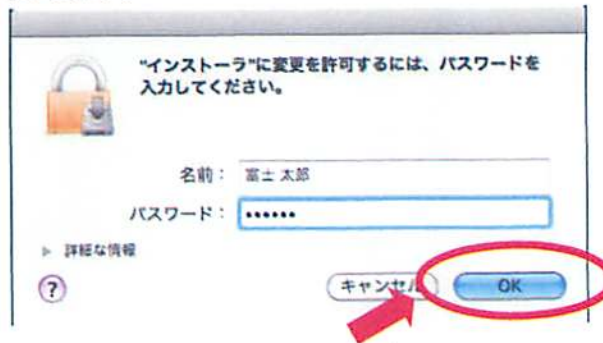


パスワードを求められたら入力し、OKをクリックします。

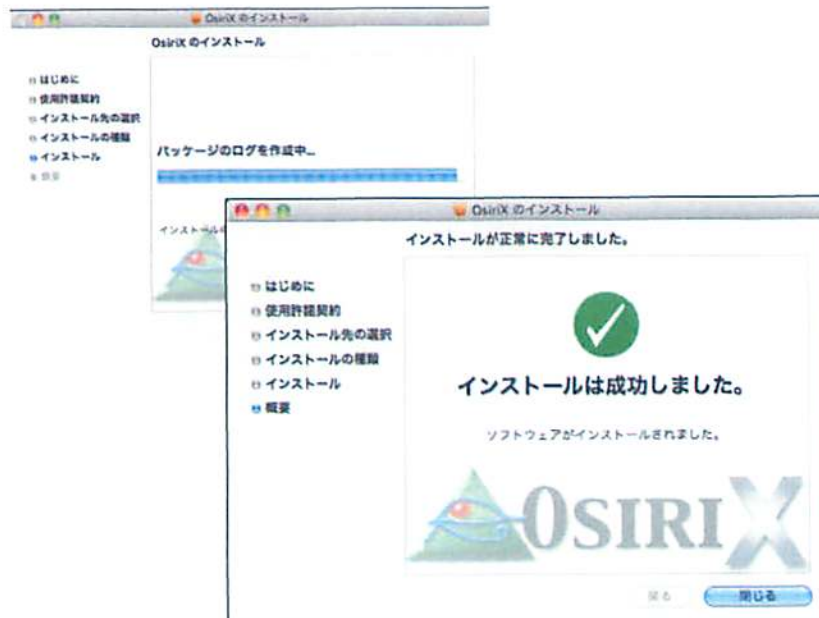

インストールが開始され、数分後にインストールが完了します。


・Dockへの登録

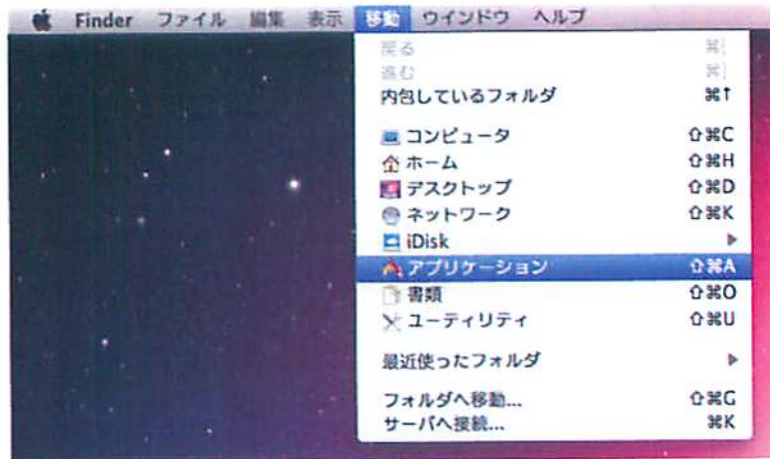

移動 → アプリケーション をクリック



アプリケーションウィンドウで OsiriX を選択

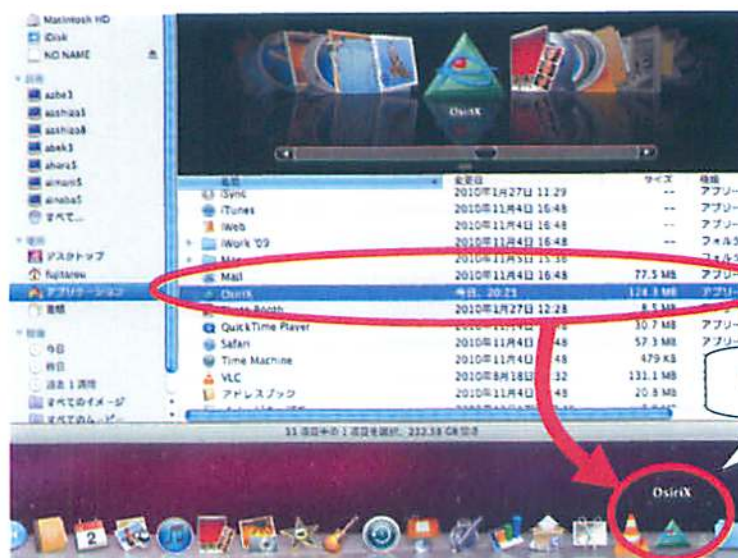

Dockにドラッグ&ドロップし、登録します。


以上で終了です。

以降、Dockに並んだOsiriXのアイコンをクリックすると起動します。


・画像表示の仕方




MAC起動時に他院からの検査画像CDを入れます。

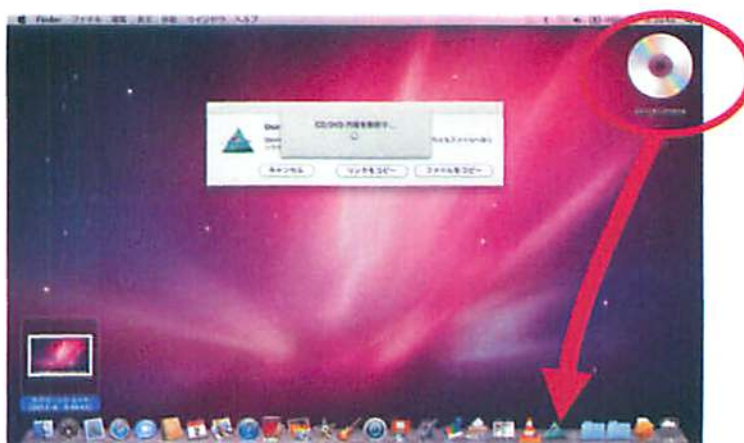


画面に出来上がるCDのアイコンをOsiriXアイコン上にドラッグ & ドロップするとCD内のDICOMデータの解析が始まります。

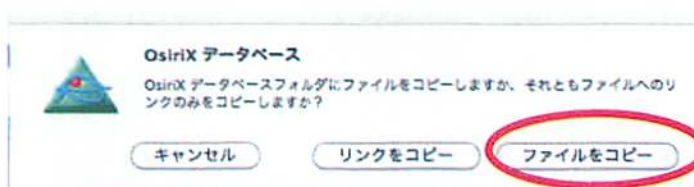

画像データのOsiriX取込み確認がありますので、「ファイルをコピー」を選択します。

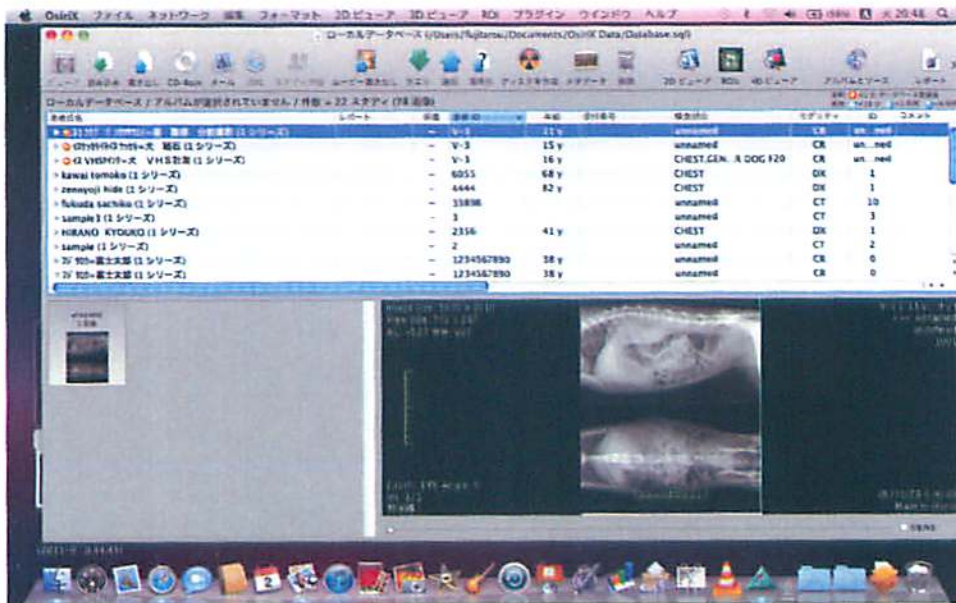

画像リスト画面にて、表示させたい画像のリストをダブルクリックします。

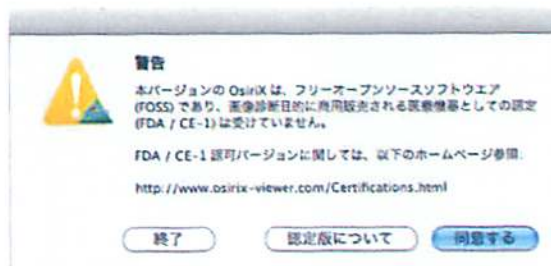

警告画面で「同意する」を選択します。



画像が表示されます。

以上で画像表示までの説明を終了します。